

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

57_2025_Reassignace alaninaminotransferasy (ALT/GPT)

Kat. č.:	Název	Balení:
XSYS0017	ALT/GPT 330	R1: 6 × 44 ml, R2: 6 × 11 ml
BLT00052	ALT/GPT 250	R1: 4 x 50 ml, R2: 1 x 50 ml
BLT00053	ALT/GPT 500	R1: 4 x 100 ml, R2: 1 x 100 ml

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o reassignaci alaninaminotransferasy (ALT) v kalibrátorech XL MULTICAL.


Reassignace byla provedena s použitím referenčního materiálu ERM-AD454k/IFCC, ve kterém byla katalytická aktivita ALT získána pomocí referenční IFCC metody při 37°C.

V důsledku tohoto procesu došlo ke změně hodnot ALT v kalibrátorech i v kontrolních sérech. Nové hodnoty naleznete v tabulkách níže.

Vezměte prosím na vědomí, že tato změna může ovlivnit hodnoty u patientských vzorků. Sdílejte tyto informace s personálem vaší laboratoře a uschovejte si toto oznámení jako součást dokumentace systému kvality vaší laboratoře. Pro další informace kontaktujte svého místního zástupce.

Aktualizované hodnoty v kalibrátorech:

Kalibrátor	Šarže	Expirace	Hodnota ALT (IFCC bez PDP)	Hodnota ALT (IFCC s PDP)
XL MULTICAL	2405057 2405058	2026-01	98,2 U/L 1,64 µkat/L	97,6 U/L 1,63 µkat/L
XL MULTICAL	2407121	2026-03	97,5 U/L 1,62 µkat/L	98,0 U/L 1,63 µkat/L
XL MULTICAL	2412108 2412109	2026-08	96,3 U/L 1,60 µkat/L	96,0 U/L 1,60 µkat/L

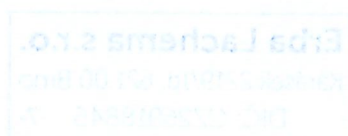

Aktualizované hodnoty v kontrolních sérech (IFCC bez PDP):

Kontrolní sérum	Šarže	Expirace	Jednotka	Hodnota	Interval	1SD
ERBA NORM	2302119 2302121	2025-12	U/L μkat/L	44,4 0,74	35,4 – 53,4 0,59 – 0,89	3,0 0,05
ERBA NORM	2310172	2026-06	U/L μkat/L	45,7 0,76	36,7 – 54,7 0,61 – 0,91	3,0 0,05
ERBA NORM	2502115 2510202	2027-10	U/L μkat/L	45,5 0,76	36,5 – 54,5 0,61 – 0,91	3,0 0,05
ERBA PATH	2302120 2302122	2025-12	U/L μkat/L	139 2,31	112 – 166 1,86 – 2,76	9 0,15
ERBA PATH	2310173	2026-07	U/L μkat/L	141 2,35	114 – 168 1,87 – 2,83	9 0,16
ERBA PATH	2502116 2504108	2027-10	U/L μkat/L	170 2,84	137 – 203 2,27 – 3,41	11 0,19

Aktualizované hodnoty v kontrolních sérech (IFCC s PDP):

Kontrolní sérum	Šarže	Expirace	Jednotka	Hodnota	Interval	1SD
ERBA NORM	2302119 2302121	2025-12	U/L μkat/L	46,2 0,77	36,9 – 55,5 0,62 – 0,92	3,1 0,05
ERBA NORM	2310172	2026-06	U/L μkat/L	47,5 0,79	37,9 – 57,1 0,64 – 0,94	3,2 0,05
ERBA NORM	2502115 2510202	2027-10	U/L μkat/L	47,3 0,79	37,7 – 56,9 0,64 – 0,94	3,2 0,05
ERBA PATH	2302120 2302122	2025-12	U/L μkat/L	141 2,35	114 – 168 1,87 – 2,83	9 0,16
ERBA PATH	2310173	2026-07	U/L μkat/L	143 2,39	113 – 173 1,91 – 2,87	10 0,16
ERBA PATH	2502116 2504108	2027-10	U/L μkat/L	172 2,86	139 – 205 2,29 – 3,43	11 0,19

Prosím o revizi i verzí šarže s písmeny A, B, C, D, E

S pozdravem,
Erba Lachema s.r.o.
MVDr. Ludmila Lukeszová
+420 778 461 522
Kontakt: L.Lukeszova@erba.com

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-



Brno, 29. října 2025

Ref. No.AN_57_2025

