

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

03_2026_Reassignace amylasy

Kat. č.:	Název	Balení (obsah)
BLT00007	AMY 250	R1: 4 × 50 mL, R2: 1 × 50 mL
BLT00008	AMY 500	R1: 4 × 100 mL, R2: 1 × 100 mL

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás informovali o reassignaci amylasy v kalibrátorech XL MULTICAL.

Reassignace byla provedena s použitím referenčního materiálu ERM-AD456/IFCC, ve kterém byla katalytická aktivita amylasy získána pomocí referenční IFCC metody při 37°C.

V důsledku tohoto procesu byly aktualizovány hodnoty amylasy v kalibrátorech i v kontrolních sérech. Nové hodnoty získané v našich materiálech po reassignaci naleznete v tabulkách níže.

V kalibrátoru XL MULTICAL byly původně sjednocené hodnoty pro amylasu nyní rozděleny do samostatných řádků pro každou soupravu / metodu stanovení. Zároveň byly zkratky pro jednotlivé analyty upraveny tak, aby odpovídaly schváleným aplikacím v našich analyzátoch XL. Tento proces zpřehlední hodnoty v listu a minimalizuje riziko chyb při ručním zadávání hodnot do analyzátorů.

Vezměte prosím na vědomí, že tato změna může ovlivnit hodnoty u patientských vzorků. Sdílejte tyto informace s personálem vaší laboratoře a uschovejte si toto oznámení jako součást dokumentace systému kvality vaší laboratoře. Pro další informace kontaktujte svého místního zástupce.

AMY 250, AMY 500

IFCC metoda s maltoheptaosidem – PNP-G7

Zkratka / aplikace pro XL analyzátor – AMY2R

Aktualizované hodnoty v kalibrátorech:

kalibrátor	šarže	expirace	AMY2R hodnota
XL MULTICAL	2404135 2405057 2405058	2026-01	209 U/L 3,48 µkat/L
XL MULTICAL	2407121 2409055	2026-03	208 U/L 3,47 µkat/L
XL MULTICAL	2412108 2412109	2026-08	200 U/L 3,33 µkat/L

Aktualizované hodnoty v kontrolních sérech:

Kontrolní sérum	šarže	expirace	jednotka	Střední hodnota	Interval	1SD
ERBA NORM	2302119 2302121	2025-12	U/L µkat/L	76,0 1,27	60,7 – 91,3 1,03 – 1,51	5,1 0,08
ERBA NORM	2310172	2026-06	U/L µkat/L	80,8 1,35	64,6 – 97,0 1,08 – 1,62	5,4 0,09
ERBA NORM	2502115 2510202	2027-10	U/L µkat/L	75,5 1,26	60,5 – 90,5 1,02 – 1,50	5,0 0,08
ERBA PATH	2302120 2302122	2025-12	U/L µkat/L	230 3,84	185 – 275 3,06 – 4,62	15 0,26
ERBA PATH	2310173	2026-07	U/L µkat/L	210 3,50	168 – 252 2,81 – 4,19	14 0,23
ERBA PATH	2502116 2504108	2027+10	U/L µkat/L	223 3,72	178 – 268 2,97 – 4,47	15 0,25

S pozdravem

Erba Lachema s.r.o.

Produktový tým

V Brně, 22.01.2026



Ref. No.AN_03_2026