

## CANDIDAtest 21

### Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych

- 21 reakcji biochemicznych
- identyfikacja 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych
- zestaw bezodczynnikowy
- komfortowy tryb oceny wyników za pomocą programu TNW
- przechowywanie w temp. pokojowej 15–25°C

### Zestaw zawiera:

- 5 płytek do mikromiareczkowania, do identyfikacji 20 szczepów
- 20 probówek zawierających nośnik zawiesiny
- folie samoprzylepne do inkubacji, 20szt.
- druki do wpisywania wyników
- torebkę specjalnie przeznaczoną do ułożenia niezużytej reszty płytki
- pokrywę z nadrukiem

# CANDIDAtest 21

Barevná škála  
 Farebná stupnica  
 Colour Scale  
 Цветная шкала  
 Porównawcza skala barw  
 Színskála  
 Farbskala  
 Escala de colores

REF 50003502

**MIKRO-LA-TEST®**


1	+	H	G	F	E	D	C	B	A
		NGA	$\alpha$ -GLU	$\beta$ -GLU	ONC	GENA	GLU	GAL	MALA
	-	○	○	○	○	○	○	○	○


2	+	H	G	F	E	D	C	B	A
		$\alpha$ -GAL	PHE	URE	UCO	RHA	INO	TRE	LAC
	-	○	○	●●	●●	○	○	○	○

3	+	H	G	F	E	D	C	B	A
		PRO	PGUR	MEL	ACO	XYL	CEL	SUC	RAF
	-	○	○	○	○	○	○	○	○



## CANDIDAtest 21

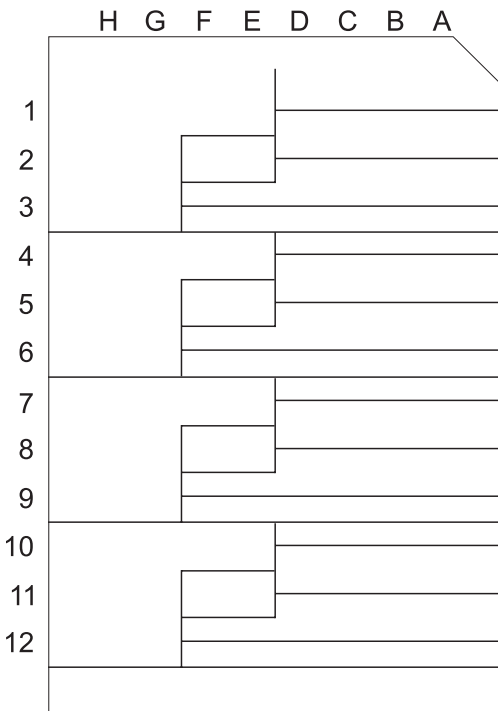

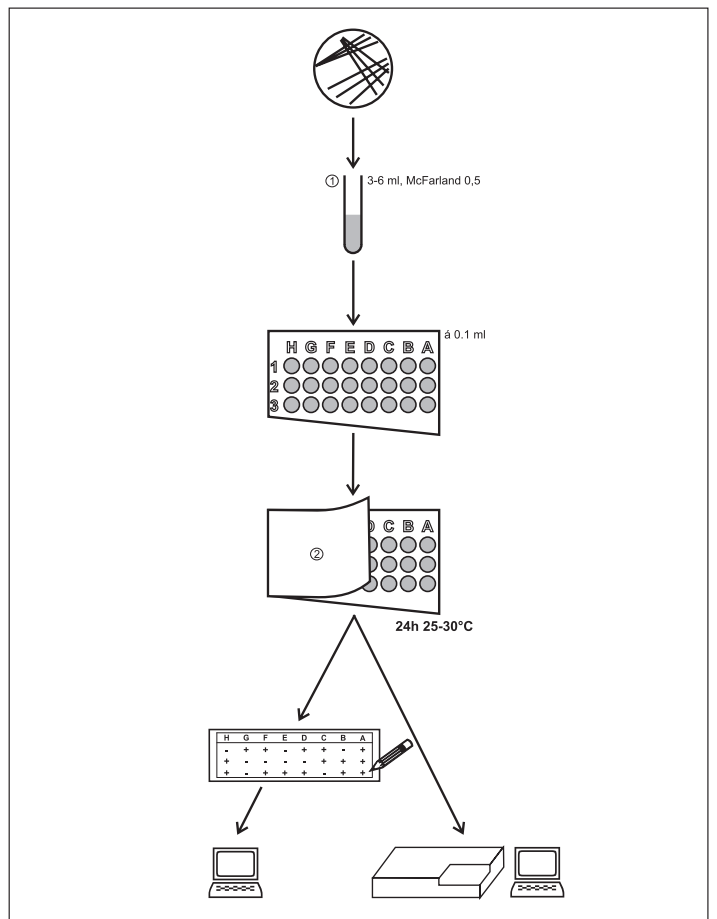① = Suspensní médium - Suspensné médium - Suspension medium - Суспензионная среда - Pożywka dla zawiesin - Szuszpenziós közeg/Suspensionsmedium/Medio de suspensin  
 ② = Přeplnění inkubační folií - preplnenie inkubačnou fóliou - sealing with plate sealer - переклейка инкубационной пленкой - Zaklejenie foliú do inkubacji - Fedje le a csikokat a fedővel.